

# Pleurofix®

## Mehr Sicherheit in Handhabung und Hygiene

Geschlossenes Pleurapunktionsbesteck



Pleura Drainage Systeme

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Pleurofix® Geschlossenes Pleurapunktionsbesteck


Überleitungsschlauch mit Standardkegel  
(Pleurofix® Nr. 2)  
oder mit  
Lock-Ansatz und Dreivegehahn  
(Pleurofix® Nr. 1 – nicht abgebildet)

Doppelrückschlagventil  
(Pleurofix® Nr. 2)  
oder mit  
Dreivegehahn  
(Pleurofix® Nr. 1 – nicht abgebildet)

Omnifix®-Lock:  
Leichtgängige 60 ml Omnifix®-Spritze

Dünnwand-Punktionskanüle:  
Punktion am indikationsgemäßen Ort

Sekretbeutel:  
Graduierter Sekretaufangbeutel  
mit 2 Liter Fassungsvermögen

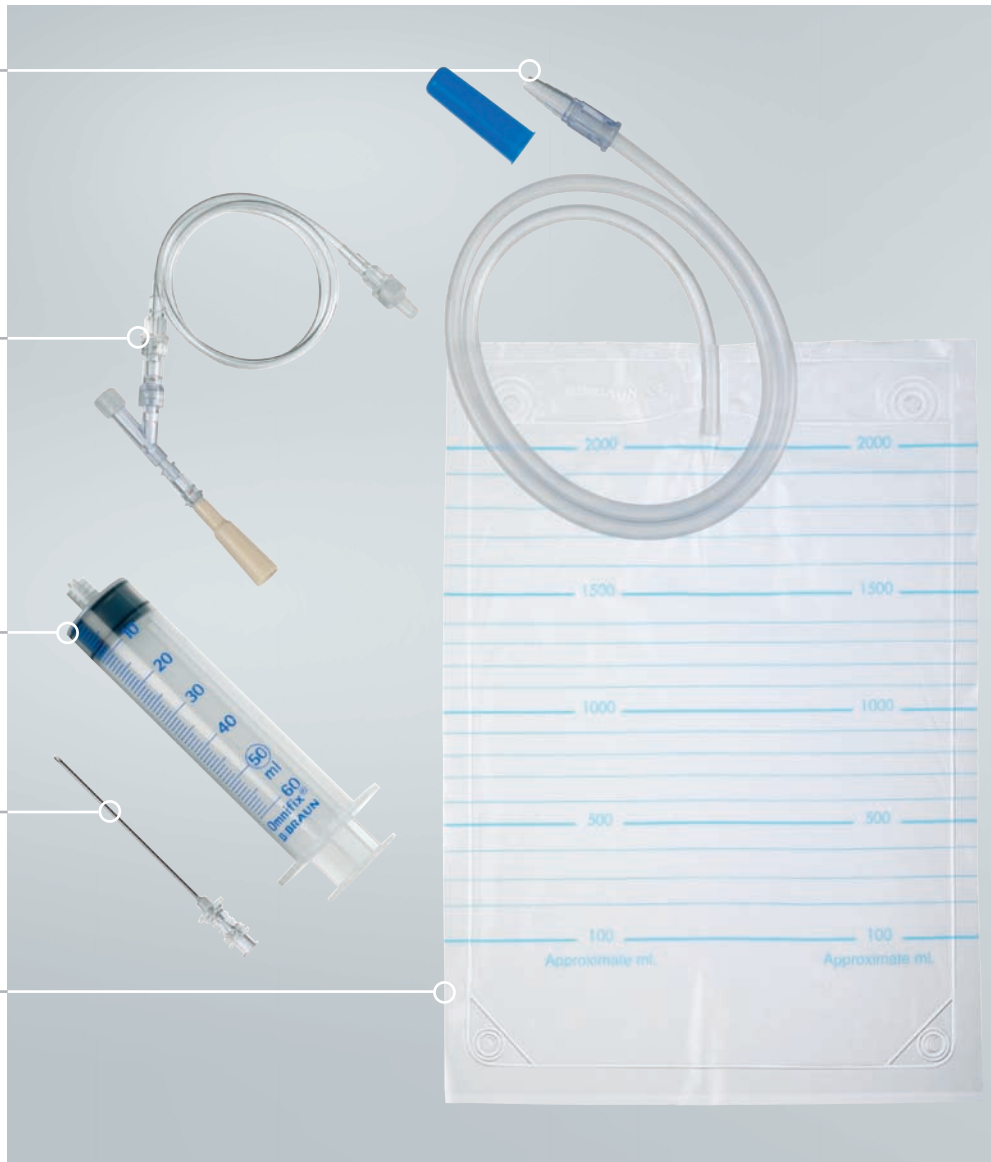

## Pleurapunktion

Ansammlungen von Luft und/oder Flüssigkeit im Pleuraraum können zu lebensbedrohlichen Störungen der Atem- sowie Herzfunktion führen. Ziel jeder Notfalltherapie ist daher, die Beseitigung der Luft oder Flüssigkeit zu garantieren. Dies geschieht mittels einer einmaligen Nadelpunktion zur Entfernung von Luft oder Flüssigkeit.


## Pleurofix® Anwendungsgebiete

- Sekretentfernung aus dem Pleuraraum
- Pneumothorax
- Spülung des Pleuraraumes
- Medikamenteninstillation

## Pleurofix® Nr. 1

### Dreiwegehahn

- Bedienungsfreundlich mit Richtungsanzeige
- Möglichkeit der Medikamenteninstillation

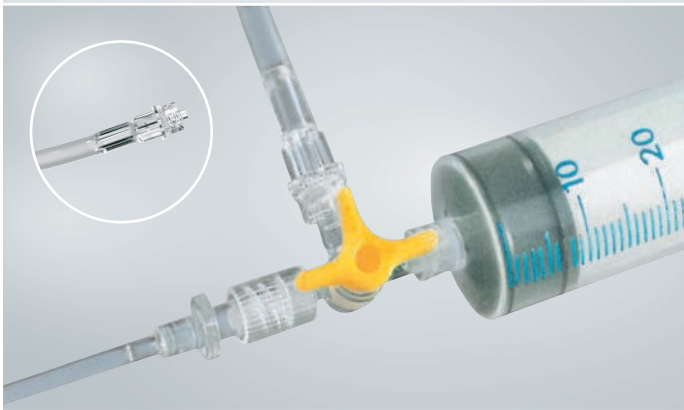

Pleurofix®, Besteck zur Pleurapunktion	Art.-Nr.	VE
<b>Pleurofix® Nr. 1 mit Discofix®-Dreiwegehahn, gelb</b>	4461002	25
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm</li> <li>▪ Überleitungsschlauch mit Lock-Ansatz</li> <li>▪ Omnifix®-Lock Einmal-Spritze 60 ml</li> <li>▪ Sekretbeutel 2,0 l</li> </ul>		
<b>Sekretbeutel passend an Pleurofix® Nr. 1</b>	4462009	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lock-Ansatz (männlich)</li> <li>▪ Überleitungsschlauch 90 cm</li> <li>▪ 2,0 l</li> <li>▪ einzeln verpackt, steril</li> </ul>		

## Pleurofix® Nr. 2

### Doppelrückschlagventil

- Kein Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten
- Leichtes Aspirieren der Flüssigkeiten und schnelles Überleiten in den Sekretbeutel



Pleurofix®, Besteck zur Pleurapunktion	Art.-Nr.	VE
<b>Pleurofix® Nr. 2 mit Doppelrückschlagventil</b>	4461037	25
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm</li> <li>▪ Überleitungsschlauch mit Standardkegel</li> <li>▪ Omnifix®-Lock Einmal-Spritze 60 ml</li> <li>▪ Sekretbeutel 2,0 l</li> </ul>		
<b>Sekretbeutel passend an Pleurofix® Nr. 2</b>	4423208	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standardkegel</li> <li>▪ Überleitungsschlauch 90 cm</li> <li>▪ 2,0 l</li> <li>▪ einzeln verpackt, steril</li> </ul>		

## Anwendung

Die Punktion muss unter aseptischen Bedingungen erfolgen. Kanüle und Spritze ankoppeln an Dreiwegehahn bzw. Verlängerungsschlauch. Kanüle durch entsprechende Stellung des Dreiwegehahns absperrern. Punktion durchführen und Kanüle bis in den Pleuraspalt vorschieben. Sekret in die Spritze saugen und danach in Beutel überführen\*. Nachlaufendes Sekret ebenfalls entfernen. Kanüle aus Pleuraraum herausziehen.

\* bei Pleurofix® Nr. 1 Dreiwegehahn verstellen;  
bei Pleurofix® Nr. 2 übernimmt das Doppelrückschlagventil die Funktion des Dreiwegehahns.  
Verstellen entfällt daher.

## Anwendungsvorteile

- Geschlossenes System durch luft- und flüssigkeitsdichte Luer-Lock-Sicherheitsverbindung
- Rasche Drainage des Pleuraraumes
- Atraumatische Punktion
- Möglichkeit der Medikamenteninstillation

