

Sonstiges

THERMO CLEAR

Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten

- Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- Fördert eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts
- Schaumarm



Produktbeschreibung

THERMO CLEAR ist geeignet zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen. Es gewährleistet eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, verhindert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist sehr schaumarm eingestellt. THERMO CLEAR ist biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung, da es auf Zitronensäure-Basis aufgebaut ist.

Anwendungsgebiete

THERMO CLEAR ist zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller geeignet. THERMO CLEAR verhindert die Verkalkung von Steckbeckenspülen.

Anwendung

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfekti-

on zugänglich sein. THERMO CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen.

Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Nicht für nicht-thermische und nicht-säurebeständige Steckbeckenspülen geeignet.

Dosierung

Je nach Automatentyp und Wasserhärte: 1 - 3 ml/l (siehe Herstellerangaben) (0,1 - 0,3 %)

Dosierung durch Fachpersonal durchführen!

Zusammensetzung

Organische Säuren < 30 %, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von THERMO CLEAR ist für alle getesteten Materialien gegeben.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nur zur professionellen Anwendung Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.
THERMO CLEAR	Kanister	5 L	3	00-127-050
Dosierhilfen	Kanisterdosierpumpe	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
	Kanisterumfüllhahn	2L/5 L/10 L	1	00-907-000
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050



DE 05/2021



Dr. Schumacher



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

P +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.com

