

medimex Ultraschallgel 1 Liter

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt

REF.MX
8M50170100
Zusammensetzung:

(Inhaltsstoffe INCI)

Aqua, Carbomer, Sodium hydroxide, Propylene glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben

(Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.)

Produktgröße:

1 Liter in zylindrischen Rundflaschen mit Klappscharnierverschluss

Beschreibung:

- Farblos, geruchlos
- Hautschonend, pH-neutral
- Höchste Übertragungswerte und beste Kunststoffverträglichkeit
- Auf Wasserbasis unter Vakuum hergestellt (deionisiertes Wasser pH7)
- Formaldehydfrei, fettfrei, microblasenfrei

Hinweise:

- Unsteril
- Zur äußerlichen Anwendung
- Enthält Alkohol

Medizinprodukt Risikoklasse I
Anwendungsbereiche:

Gel für Ultraschall-Anwendungen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin

Haltbarkeit:

Durch die konstruktivbedingt fehlende Wiederverschließbarkeit von Dosierspendern in Verbindung mit 5 L und 10 L Kunststoffkanistern ist eine Haltbarkeit nach Anbruch bis zu 6 Monaten, längstens jedoch bis zum Erreichen des auf dem Produkt angedruckten Verfallsdatums, gewährleistet. Gleiches gilt für alle anderen Gebinden.

Nach Verwendung sind die Gebinde grundsätzlich sorgfältig zu verschließen.

Anwendungshinweise
Umfüllen:

Das Umfüllen von Ultraschallgel aus 5 L bzw. 10 L Gebinden in Kleingebinde bis 1000 ml darf nur unter Beachtung nachfolgender aufgeführter hygienischer Anforderungen durchgeführt werden:

Der Anwender trägt nach Handdesinfektion Einmalhandschuhe und verwendet vom Hersteller mitgelieferte Kleingebinde. Die Umfüllung muss chargenrein erfolgen, damit auch die eindeutige Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Nach Entleerung des Großgebindes sind die ebenfalls entleerten Kleingebinde zu entsorgen.

Vor der Anwendung ist der ordnungsgemäße Zustand des Ultraschallgels festzustellen.

Verpackungseinheiten:

VE= 1 Flasche

UK= 12 Flaschen im Karton


Vertrieb
medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9-11

D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300

fax +49.6431.7302 235

www.medimex.de



GELLO® GmbH Geltechnik

Harmate 28

D-48683 Ahaus

8M50170100-TD000919-3

Stand: 08-2019