

medimex Ultraschallgel 5 Liter Kanister

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt

REF.MX

8M50170150

Zusammensetzung:

(Inhaltsstoffe INCI)
 Aqua, Carbomer, Sodium hydroxide, Propylene glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben
 (Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.)

Produktgröße:

5 Liter in Kanister mit Schraubverschluss

Beschreibung:

- Farblos, geruchlos
- Hautschonend, pH-neutral
- Höchste Übertragungswerte und beste Kunststoffverträglichkeit
- Auf Wasserbasis unter Vakuum hergestellt (deionisiertes Wasser pH7)
- Formaldehydfrei, fettfrei, microblasenfrei

Hinweise:

- Unsteril
- Zur äußerlichen Anwendung
- Enthält Alkohol

Medizinprodukt Risikoklasse I

Anwendungsbereiche:

Gel für Ultraschall-Anwendungen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin

Haltbarkeit:

Durch die konstruktivbedingt fehlende Wiederverschließbarkeit von Dosierspendern in Verbindung mit 5 L und 10 L Kunststoffkanistern ist eine Haltbarkeit nach Anbruch bis zu 6 Monaten, längstens jedoch bis zum Erreichen des auf dem Produkt angedruckten Verfallsdatums, gewährleistet. Gleiches gilt für alle anderen Gebinden.
 Nach Verwendung sind die Gebinde grundsätzlich sorgfältig zu verschließen.

Anwendungshinweise

Umfüllen:

Das Umfüllen von Ultraschallgel aus 5 L bzw. 10 L Gebinden in Kleingebinde bis 1000 ml darf nur unter Beachtung nachfolgend aufgeführter hygienischer Anforderungen durchgeführt werden:
 Der Anwender trägt nach Handdesinfektion Einmalhandschuhe und verwendet vom Hersteller mitgelieferte Kleingebinde. Die Umfüllung muss chargenrein erfolgen, damit auch die eindeutige Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Nach Entleerung des Großgebundes sind die ebenfalls entleerten Kleingebinde zu entsorgen.
 Vor der Anwendung ist der ordnungsgemäße Zustand des Ultraschallgels festzustellen.

medimex Ultraschallgel 5 Liter Kanister

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt

Verpackungseinheiten: VE= 1 Kanister
UK= 4 Kanister im Karton



Als Zubehör lieferbar: **medimex Pumpe für 5 Liter medimex Ultraschallgel-Kanister**

REF.MX **8M50170185**

Verpackungseinheiten: VE= 1 Stück

Vertrieb
medimex GmbH
In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg
fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de

The logo for GELLO, featuring a stylized black silhouette of a factory or industrial building.

GELLO® GmbH Geltechnik
Harmate 28
D-48683 Ahaus

8M50170150-TD000920-3
Stand: 08-2019
Seite 2 von 2