

zetClean®

Wiper Bowl® Safe & Clean für Multitex® Wipes




Wischn statt Sprühen

Der höhere Qualitätsanspruch
im Bereich der Hygienestandards

- Senkung des Desinfektionsmittelverbrauchs – die Anwendungslösung ist bis zu 30 Tage verwendbar
- hoher Hygienestandard bei der täglichen Reinigung
- Multitex® Wipes bestehen aus 100% PET* – so wird die Wirkstoffkonzentration der Desinfektionsmittel nahezu vollständig abgegeben
- befüllbar mit den Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen Ihrer Wahl
- verwendbar für die fusselfreie Reinigung nahezu aller Materialien und Untergründe
- hohe Reißfestigkeit bei großer Saugfähigkeit
- einfache Entnahme der Einmaltücher durch Abriss-Perforation – so sind 60/90 Desinfektionsvorgänge möglich
- wirksamer Schutz vor Austrocknung durch wiederverschließbaren Deckel
- alle relevanten Inhaltsinformationen sicher im Blick durch beschriftbares Chargenetikett

*PET hat ein geringes Absorptionsverhalten der QAV (Quartäre Ammonium-Verbindungen) an den Fasern.

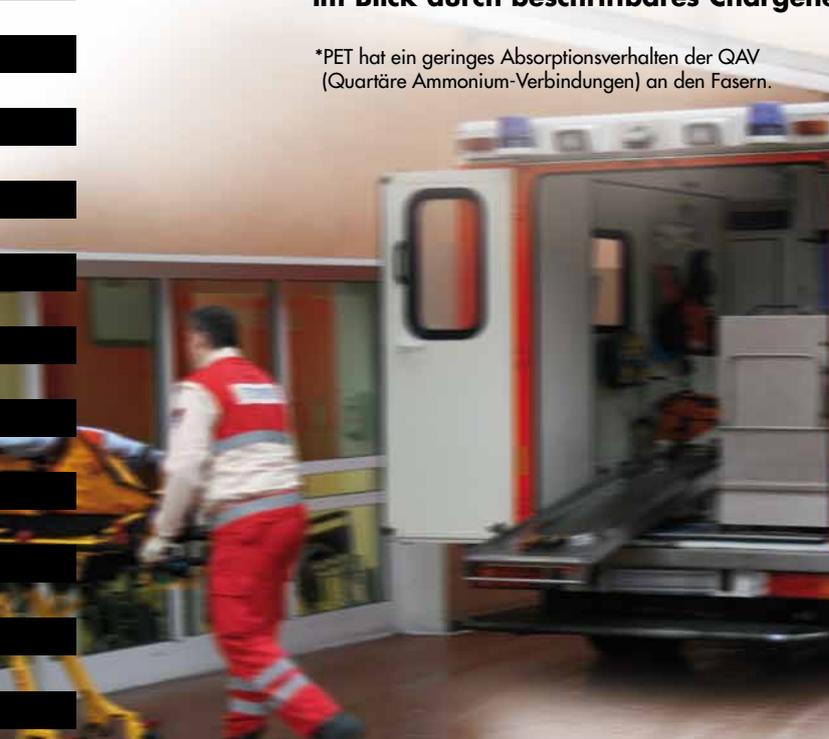

Aufklappen, rausziehen, anwenden: Auf diesen Baukasten können Sie bauen.

WiperBowl® Safe & Clean ist die ökonomische und hygienische, wiederbefüllbare „Baukastenlösung“ zur gründlichen Scheuer-/Wischdesinfektion und Reinigung sensibler Bereiche wie z. B. in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder im Rettungsdienst, entsprechend der Empfehlung des Robert Koch Instituts.

WiperBowl® Safe & Clean Spendereimer groß

ca. 21 cm Ø, Höhe ca. 19,5 cm
 ■ Art.-Nr. 60997-00 ■ VE = 1 Eimer

Multitex® Wipes Rolle DR

Rollen sind einzeln verpackt, 1 Rolle = 90 trockene Wischtücher
 ca. 30 x 32 cm, C-Falz, 100 % PET mit fein gelochter Oberfläche
 ■ Art.-Nr. 11839-00 ■ VE = 6 Rollen

Multitex® Wipes Rolle RD

Rollen sind einzeln verpackt, 1 Rolle = 90 trockene Wischtücher
 ca. 30 x 32 cm, gefaltet, 100 % PET
 ■ Art.-Nr. 11840-00 ■ VE = 6 Rollen

WiperBowl® Safe & Clean Spendereimer klein

ca. 18,5 cm Ø, Höhe ca. 17,5 cm
 ■ Art.-Nr. 60996-00 ■ VE = 1 Eimer

Multitex® Wipes Rolle DR

Rollen sind einzeln verpackt, 1 Rolle = 60 trockene Wischtücher
 ca. 30 x 32 cm, C-Falz, 100 % PET mit fein gelochter Oberfläche
 ■ Art.-Nr. 11830-02 ■ VE = 8 Rollen

Wandhalterung für Spendereimer groß

■ Art.-Nr. 60097-00, auch mit Schloss lieferbar

Wandhalterung für Spendereimer klein

■ Art.-Nr. 60092-00, mit Schloss



Einweg ist der bessere Weg!

Aus den Empfehlungen des Robert Koch Institutes geht eindeutig hervor, dass das Wiedereintauchen der benutzten Tücher in die Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittellösung verhindert werden muss, bzw. zu minimieren ist.

Einwegtücher sind aus hygienischer Sicht daher empfehlenswert und bieten gegenüber Mehrwegtüchern eine Kostenersparnis sowie ein geringeres Risiko für eine Kontamination (kein Waschen, Legen, bzw. Falten und der Transport).



Einfache Vorbereitung – sichere Anwendung

Tränken Sie die Tuchrolle im Eimer mit Ihren bewährten Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen und kennzeichnen das Etikett entsprechend. Dann verschließen Sie den Deckel und lassen die Flüssigkeit von den Tüchern aufsaugen. Bereits nach einigen Minuten Wartezeit ist Ihr **WiperBowl®** Spendersystem einsatzbereit.

Durch **das praktische Chargenetikett** haben Sie alle relevanten Inhaltsinformationen während der gesamten Einsatzzeit sicher im Blick.

ZVG
Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Zentrale
 Urbacher Straße 4+5
 D-53842 Troisdorf
 Tel.: +49 (0)2241 484-0
 Fax: +49 (0)2241 484-29
 info@zvg-troisdorf.de
 www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
 Gröninger Weg 7
 D-74379 Ingersheim
 Tel.: +49 (0)7142 9123-0
 Fax: +49 (0)7142 779131
 info@zvg-gmbh.de
 www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Zellstoffvertrieb Sachsen GmbH
 Gewerbering Nord 24
 D-01900 Bretnig-Hauswalde
 Tel.: +49 (0)35955 831-0
 Fax: +49 (0)35955 447-17
 info@zvg-sachsen-gmbh.de
 www.zvg-sachsen-gmbh.de