


## forte Wundspüllösung

### Hypertone, basische Meersalzlösung mit aktivem Sauerstoff

- Enthält NaCl 3% (Sal Maris), NaOCl 0,2%

- Die natürlichen Komplexverbindungen der Meersalz-Spurenelemente wirken antientzündlich und beeinflussen Zellmilieu und Wundstoffwechsel positiv. Durch den erhöhten Salzgehalt von 3% und der höheren NaOCl-Konzentration werden stark fibrinös oder eitrig belegte und stark übelriechende Wunden intensiver gereinigt.

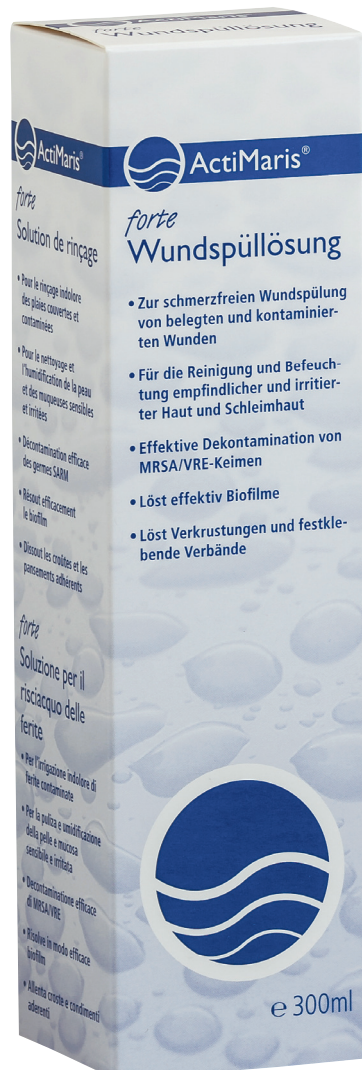

- Aktiver Sauerstoff neutralisiert schnell und langanhaltend Gerüche und wirkt eliminierend auf wundtypische Erreger.
- Der basische pH-Wert unterstützt die kontrollierte Freisetzung des aktiven Sauerstoffs.

## So funktioniert ActiMaris forte

ActiMaris *forte* dient der Initialreinigung stark fibrinös oder eitrig belegter, stark von Keimen besiedelter und übelriechender Wunden. Neben der intensiven Reinigungsleistung werden dank des optimalen Zusammenspiels von aktivem Sauerstoff, ionisiertem Meerwasser und basischem pH-Wert Entzündungen reduziert, Wundödeme ausgeschwemmt und auch extreme Gerüche schnell und langanhaltend eliminiert. Die schnelle, intensive Reinigungsleistung von o.g. Wundsituationen wird durch die höhere Konzentration von NaCl und NaOCl erreicht. Da die Spurenelemente von ActiMaris *forte* in ihren natürlichen, physiologischen Komplexverbindungen vorliegen, werden Zellmilieu und Wundstoffwechsel positiv beeinflusst. ActiMaris *forte* ist auch für empfindliche, irritierte und entzündete Haut und Schleimhaut geeignet.

## Vorteile von ActiMaris forte

ActiMaris *forte* ist die optimale Lösung für Anwender und Patienten, die stark fibrinös oder eitrig belegte, stark keimbesiedelte und übelriechende Wunden natürlich und sanft, aber auch effektiv reinigen möchten.

### Aktive, schnelle und langanhaltende Geruchsreduktion

Wird ActiMaris *forte* auf einer übel riechenden Wunde angewendet, reagiert der aktive Sauerstoff mit den Geruchsmolekülen und neutralisiert diese. Aktiver Sauerstoff wirkt zudem eliminierend auf wundtypische Erreger.

### Entzündungsminderung

Dank der Spurenelemente, die in ihren natürlichen Komplexverbindungen und in physiologisch richtiger Konzentration vorliegen, wirkt ActiMaris *forte* anti-entzündlich.

### Abschwellende Eigenschaften

Der Rückgang von Entzündungen und der aktive Sauerstoff begünstigen abschwellungsfördernde Prozesse. Der erhöhte Salzgehalt von 3% unterstützt die Ausschwemmung von Wundödemem und reduziert den Wundschmerz.

### Tiefenwirkung

Da die H<sub>2</sub>O-Moleküle in ionisiertem Meerwasser klein sind, können die Bestandteile der Wundspüllösung tief ins Gewebe eindringen und dort ihre Wirkung optimal entfalten.

### Lange Verwendungsdauer und einfache Lagerung

ActiMaris *forte* kann nach dem Öffnen 3 Monate verwendet und bei Zimmertemperatur gelagert werden – und dies ohne den Zusatz künstlicher Konservierungsmittel. Damit ist ActiMaris *forte* anwenderfreundlich und wirtschaftlich.

## Anwendungshinweise

ActiMaris *forte* kann zimmerwarm angewendet werden. Bei Wunden mit erhöhter Schmerzneigung kann die Wundspüllösung unmittelbar vor der Anwendung auf Körpertemperatur erwärmt werden. Vor Verwendung von ActiMaris *forte* sollten die Wunden zuerst mit ActiMaris *sensitiv* gespült und gereinigt werden, um Schmutz und leicht lösbare Beläge zu entfernen.

Die anschließende Tiefenreinigung und Geruchsreduzierung erfolgt dann mit ActiMaris *forte*. Dazu werden mit

der Wundspüllösung getränkte Verbände eingesetzt. Die empfohlene Dauer der Nassphase beträgt bei stark fibrinös oder eitrig belegten, infizierten oder stark übelriechenden Wunden 5-10 Minuten. Die Dauer und Frequenz der Anwendung ist an die individuellen Wundverhältnisse anzupassen und sollte so lange durchgeführt werden, bis sich alle Beläge und Nekrosen leicht entfernen lassen. Nach Verbesserung des Wundzustandes wird zur weiteren Wundreinigung die Anwendung von ActiMaris *sensitiv* empfohlen. Decken Sie die Wunde anschließend mit einem adäquaten Primär- oder Sekundärverband ab. ActiMaris *forte* ist zur Kurzzeitanwendung für eine Dauer bis zu 7 Tagen auch bei empfindlicher/irritierter Haut und Schleimhaut geeignet. Die Wundspüllösung wird dermatologisch als unbedenklich bewertet. Die Anwendung ist schmerzarm und wird im Allgemeinen auch von Allergikern gut vertragen.

## Anwendungsgebiete

ActiMaris *forte* ist besonders zur Initialreinigung stark fibrinös oder eitrig belegter, infizierter oder stark übelriechender Wunden geeignet. Mit der Wundspüllösung können

- akute, chronische, thermische und chemische Wunden
- Eintrittsporten urologischer Katheter, PEG-Sonden und Drainagen

gereinigt, gespült, befeuchtet und dekontaminiert werden.

ActiMaris *forte* kann zur intraoperativen Reinigung und Spülung von Wunden, zum Lösen verkrusteter Wundverbände sowie zur Befeuchtung von inaktiven Verbänden angewendet werden.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

## ActiMaris Wundspüllösung forte

Artikelnr.	Inhalt	PZN/ Packung	Stck./ Packung	Stck./ Versandkarton
30 350	300 ml	10 25 90 35	1	30

## ActiMaris AG



simple medical solutions

ActiMaris AG, Technikumstrasse 14,  
CH-9470 Buchs SG, Switzerland  
www.actimaris.com  
Telefon: 0041 71 5057525  
Fax: 0041 71 5057524



Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com).

Mölnlycke Health Care GmbH  
Telefon 0211 92088-0 · Telefax 0211 92088-170